

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

※※2008年10月1日改訂（第5版）

承認番号 20100BZZ01338000

※2008年3月10日改訂

器80 はり又はきゅう用器具
管理医療機器 滅菌済み鍼 JMDNコード 34175000

スポールバン®

SPORBAN

再使用禁止

【禁忌・禁止】

一度使ったものは再使用しないでください。


※【形状・構造及び原理等】

スポールバンは、酸化鉄粉末成型板（圧粒子）の中央に小さな穴をあけ、そこからハリ先を出してテープで固定した鍼治療器具です。

ハリ（円皮鍼）：ステンレス鋼線

酸化鉄粉末成型板（圧粒子）：酸化鉄酸化バリウム

テープ：アクリル系粘着剤を塗付した布

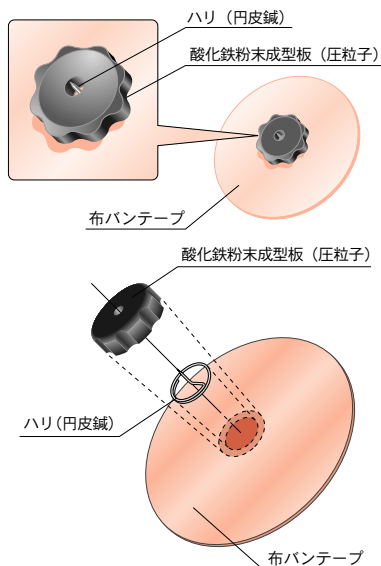

【使用目的、効能又は効果】

鍼治療に使用すること

【品目仕様等】

エチレンオキサイドガス滅菌済み

【操作方法又は使用方法等】

1. 皮膚の汚れや汗をふきとり清潔にご使用ください。
（できれば、市販の消毒薬で消毒してください。）
2. コリや痛みのあるところを指で押さえ、特に痛みや不快感のある箇所を中心にはってください。
3. 皮膚面に直角に正しくはってください。
- ※※ 4. 入浴時は、貼付箇所をタオル等で強くコスらないでください。
はがれたりケガの原因になることがあります。入浴後、はがれていないことを確認してください。
5. 2～3日毎に、わずかに場所をずらして、新しいものとはりかえてください。

《使用方法に関連する使用上の注意》

1. 本品は分解しないでください。衛生上の問題、ハリの

紛失、小児の誤飲等の原因となります。

2. 万一飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断を受け、指示に従ってください。

【使用上の注意】

1. 使用上の注意
 - 1) アレルギー体質の方は使用を避けてください。
 - 2) 傷・湿疹等のある箇所を避けてください。
 - 3) 心臓ペースメーカー等体内植込型医用電子機器を装着している方は、使用しないでください。
 2. 重要な基本的注意
 - 1) 本品は、使い捨て製品であるので、1回限りの使用のみで再使用しないでください。
 - 2) 本品の使用により発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
 3. その他の注意
- ※ 1) 使用後はハリがむき出しにならないよう布バンテープを折り中央部を包み、不燃物として廃棄してください。
- ※※ 2) 公衆浴場等やプールでは、使用を中止してください。
- 3) 医家向

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
幼児の手の届かない所に保管してください。
2. 使用期限
使用期限は外箱に記載〔自己認証（当社データ）による〕

【包装】

10本（10本/袋×1袋）、20本（10本/袋×2袋）
30本（10本/袋×3袋）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：Ⓡ 祐徳薬品工業株式会社
住 所：〒849-1393

佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1

T E L：0954-63-1231(代)

製造業者：Ⓡ 祐徳薬品工業株式会社

— かんたんハリ治療 —

指で押してコリのあるところや最も痛むところ（圧痛点）にまず1つ、それに接近させて2～4個貼ってください。

